

EGYSZER HASZNÁLATOS FÉNYVEZETŐ

Használati Útmutató

EGÉSZSÉG A FÉNY EREJÉVEL!

Haemo-Laser[®]


Premium Health Concepts Kft.

H-9400 Sopron Verő József u.1
+36 30 / 229 21 96
office@premiumhealth.hu
www.premiumorvos.hu
www.heltschl.hu

EGYSZER HASZNÁLTOS FÉNYVEZETŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Terméjkellemzők, alkalmazási terület

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető az intravazális vérbesugárzáshoz használandó a Lágylézer segítségével. Ezzel sugározzák be a páciensek véréét az alkari vénában a lézerfényvel.

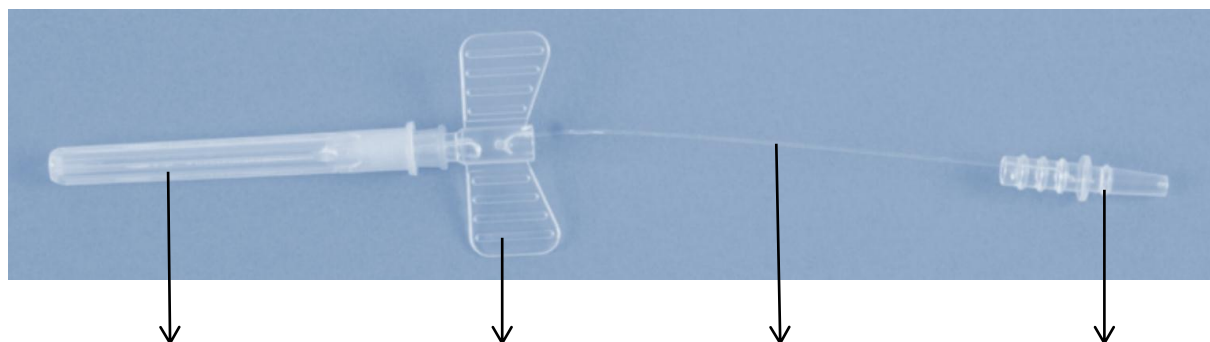

Tű védősapkával

Pillangó

Fényvezető

Dugós csatlakozó

2. Figyelmeztetések és óvintézkedések

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető alkalmazása csak ebben a használati utasításban leírtak szerint használható.

A vérbesugárzás a **Haemo-Laser®** segítségével egy invazív terápiaforma, és csak megfelelően szakképzett személy végezheti.

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető egy steril egyedi készítmény. Ezért az Egyszer használatos Fényvezetőt csak egyszer egy páciensnél lehet felhasználni és ezután el kell dobni. A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt nem szabad újra felhasználni, és a leszállítandó kimenő teljesítményben eltéréshez vezethet. Azok a termékek, amelyek tartóssági ideje már lejárt, többé ne használja!

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető rendeltetés szerinti felhasználása a pácienseknél meghatározott (< 60 Perc). Ezért az Egyszer használatos Fényvezetőt minden kezelés után el kell távolítani.

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető steril csomagolását csak közvetlenül felhasználás előtt szabad kinyitni. A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt sérült csomagolás esetén nem szabad tovább felhasználni.

A kanül fém részét a behelyezés előtt nem szabad megérinteni. A Fényvezetőt ne húzza ki teljesen a kanülből és ne érjen hozzá.

Behelyezés előtt lazítsa meg a kanülon a pillangót és kb. 1 cm-t húzza vissza. Ezzel elkerülhető egy lehetséges fájdalmas beszúrás a fenti fényvezető tűhegyén.

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt a terápia alatt ne válassza el a páciens adaptertől. Ezáltal a káros lézersugár nem kerül ki a páciens adapterből. A lézer készülék csak a behelyezett Egyszer használatos Fényvezetőnél a páciens adapteren aktiválódik.

A szúrás helyét a **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető eltávolítása után megfelelően kell ellátni (Nyomó- illetve ragasztó kötés).

3. Felhasználás

A szúrás helyét fertőtlenítyük, a **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt kivesszük a steril csomagolásból és a tűről le vesszük a védősapkát. A kanül behelyezése előtt meglazítjuk a pillangót, és a pillangót a fényvezetővel kb. 1 cm-rel a kanülben visszahúzzuk.

A kanült a vénába szúrjuk, ezt követően a pillangót és a kanült újra összedugjuk. Ugyanakkor figyeljünk oda a jól illesztett csatlakozásra. A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt rögzíteni kell a pácienshez egy rögzítő tapasszal.

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető dugós csatlakozóját a páciens adapterhez kell rögzíteni. Méghozzá ügyelve a biztonságos összekapcsolásra a páciens adapterben.

A páciens adapterrel, valamint a terápiás készülékkel való kezeléshez a mindenkori használati utasítást be kell tartani.

Az Egyszer használatos Fényvezetőt a terápia végeztével leválasztjuk a páciens adatterről és a rögzítő tapaszt is le vesszük. Ezután eltávolítjuk az Egyszer használatos Fényvezetőt és a beszúrás helyét szakszerűen ellátjuk (Nyomó-, illetve ragasztó kötés). A védőkupakot visszatesszük a tűre és **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezetőt a szemébe dobjuk.

4. Kombinálhatóság más orvosi eszközökkel

A **Haemo-Laser®** Egyszer használatos Fényvezető biztonságos felhasználása érdekében csak a Heltschl Medizintechnik **Haemo-Laser®** Páciens adapterével szabad kombinálni. Bármely egyéb felhasználás, vagy kombináció az orvosi eszközökkel harmadik fél számára nem engedélyezett.

5. További információk

Információk a javallatokhoz, ellenjavallatokhoz, továbbá a lézersugár leadás részleteihez és óvintézkedéseikhez a páciens adapter használati utasításában szerepelnek.

6. Forgalmazó:

Premium Health Concepts Kft.

9400 Sopron, Verő J. u. 1.

Tel. +36-30/229-2196

Fax: +36-99/514-695

office@premiumhealth.hu

7. Szimbólumok



CE-jelölés 93/42/EGK irányelv



Gyártási tételszám



Felhasználhatóság



Gyártó



Besugárzás által sterilizálva



Használati utasítást figyelembe venni



Nem újrahasználató



Sérült steril csomagolás esetén nem használható fel